

# Подготовка пациента к проведению процедуры Preparation of the patient for procedure

# ORMED

professional

## • пояснично-крестцовая тракция lumbosacral traction



- фиксация грудного пояса к поручню
- thoracic belt fixation to the handrail



- крепление тазового пояса
- pelvic girdle attachment




- поясница располагается на стыке статичной и подвижной частей кушетки
- расположение поясов на пациенте
- loin is located on the fixed-to-movable joint of the couch
- belt fixation on the patient



- крепление ремней тазового пояса к рычагу вытяжения
- pelvic girdle belts fixation to the traction lever



- крепление грудного пояса
- thoracic girdle attachment

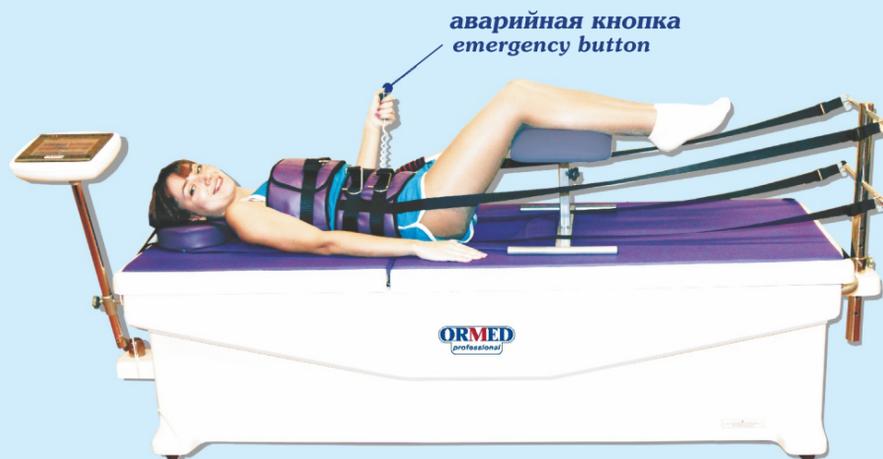

- снятие с фиксации подвижной секции кушетки
- removing of the couch movable part fixation



## • тракция шейного отдела позвоночника cervical part of spinal column




- петля Глиссона фиксируется липучками в затылочной части
- cervical halter is fixed with sticky elements in occipital area



- ленты петли Глиссона симметричны оси позвоночника
- tying bands are symmetric to the axis of spinal column



- крепление петли Глиссона за рычаг вытяжения
- attachment to the traction lever

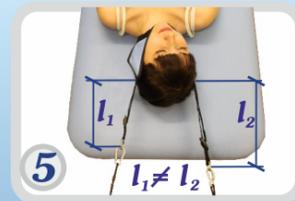

- дифференцированное вытяжение
- differentiated traction





- симметричное вытяжение
- balanced traction

## • суставы верхних и нижних конечностей articulations of upper and lower extremities



- Для закрепления лечебного эффекта от процедур вытяжения пациенту необходим покой и использование индивидуальных бандаж-поясов.

- To consolidate treatment response the patient needs rest and bandage belts wearing

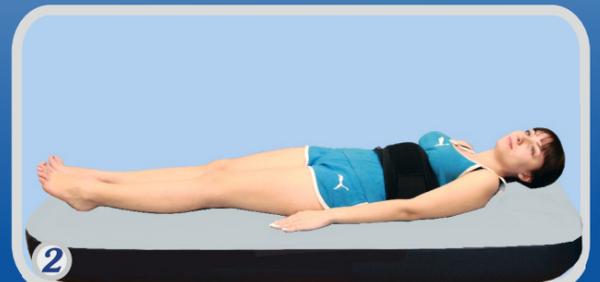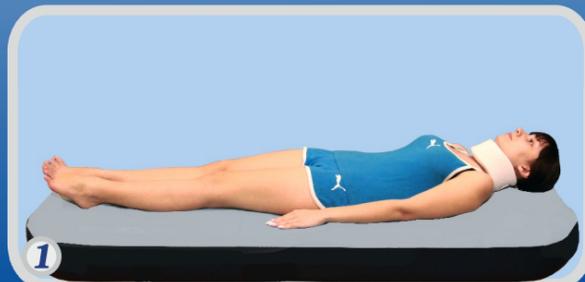

# ЗДОРОВЬЕ ПОЗВОНОЧНИКА В ВАШИХ РУКАХ HEALTH OF YOUR SPINE LIES WITH YOU